



ANLEITUNG

Umgang mit Mund-Nasen-Schutzmasken (auch FFP2 Masken!)










Alle von der Persönlichen Assistenz GmbH zur Verfügung gestellten Mund-Nasen-Schutzmasken sind ausschließlich im Rahmen von Assistenzleistungen bei Auftraggeberinnen und Auftraggebern zu verwenden.

- Eine Maske NUR mit frisch desinfizierten Händen aus der Verpackung entnehmen.
- WICHTIG: während der Benutzung der Maske NICHT ins Gesicht greifen!
- Nach Dienstende die Maske mit frisch desinfizierten Händen an den Ohrenschnallen abnehmen.
- Soweit verfügbar, ist die FFP2-Schutzmaske täglich zu wechseln.
- Es darf bei unterschiedlichen Auftraggeberinnen und Auftraggebern keinesfalls dieselbe Schutzmaske verwendet werden.

Fragen bitte an:
DGKP Gernot Larsen
Pflegebegleitung
0664 / 96 91 963
larsen@p-ass.at

Rückseite beachten!

Diese Anleitung zur richtigen Verwendung von einfachen Mund-Nasen-Schutzmasken gilt dem Prinzip nach auch für FFP2-Masken:

			
Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Schutzmaske anlegen.	Stellen Sie sicher, dass die richtige Seite der Schutzmaske nach außen zeigt.	Platzieren Sie den metallischen Nasenbügel auf Ihrem Nasenrücken.	Befestigen Sie die elastischen Bänder der Schutzmaske hinter Ihren Ohren.
			
Stellen Sie sicher, dass Nase und Mund vollständig und lückenlos bedeckt sind.	Drücken Sie den metallischen Nasenbügel an, um die Form dem Nasenrücken anzupassen.	Nehmen Sie die Maske von hinten nach vorne mit sauberen Händen ab. Berühren Sie nur die elastischen Bänder.	Entsorgen Sie die Maske in einem geschlossenen Behälter, ohne die Innen- und Außenseite der Maske zu berühren.
			
So muss es aussehen, wenn die Schutzmaske korrekt angelegt ist.	Berühren Sie die Maske nicht während des Tragens, ohne vorher die Hände gewaschen zu haben.	Wechseln Sie die Maske, falls diese feucht geworden ist und benutzen Sie diese nicht erneut.	