



ANLEITUNG

Umgang mit Mund-Nasen-Schutzmasken (auch FFP2 Masken!)

Alle von der Persönlichen Assistenz GmbH zur Verfügung gestellten Mund-Nasen-Schutzmasken sind ausschließlich im Rahmen von Assistenzleistungen bei Auftraggeberinnen und Auftraggebern zu verwenden.

- Eine Maske NUR mit frisch desinfizierten Händen aus der Verpackung entnehmen.
- Wenn eine Auftraggeberin oder ein Auftraggeber mehrere Persönliche Assistentinnen oder Assistenten hat, diese Maske sofort mit dem eigenen Namen zu beschriften.
- WICHTIG: während der Benützung der Maske NICHT ins Gesicht greifen!
- Nach Dienstende die Maske mit frisch desinfizierten Händen an den Ohrenschnur abnehmen.
- Wenn möglich, an einen eigenen Kleiderhaken oder einen Platz hängen, der nur für eine Assistenzperson bestimmt ist, da diese Maske NUR bei dieser Auftraggeberin oder diesem Auftraggeber benützt werden darf!
- Die Maske MUSS dabei innenseitig belüftet sein, NICHT zusammenklappen.
- So kann diese Maske mehrfach verwendet werden (wenn die Maske nass wird oder vom vielen Tragen unangenehm wirkt, bitte entsorgen und eine neue verwenden.)

Fragen bitte an:
DGKP Gernot Larsen
Pflegebegleitung
0664 / 96 91 963
larsen@p-ass.at

Rückseite beachten!



Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Schutzmaske anlegen.



Stellen Sie sicher, dass die richtige Seite der Schutzmaske nach außen zeigt.



Platzieren Sie den metallischen Nasenbügel auf Ihrem Nasenrücken.



Befestigen Sie die elastischen Bänder der Schutzmaske hinter Ihren Ohren.



Stellen Sie sicher, dass Nase und Mund vollständig und lückenlos bedeckt sind.



Drücken Sie den metallischen Nasenbügel an, um die Form dem Nasenrücken anzupassen.



Nehmen Sie die Maske von hinten nach vorne mit sauberen Händen ab. Berühren Sie nur die elastischen Bänder.



Entsorgen Sie die Maske in einem geschlossenen Behälter, ohne die Innen- und Außenseite der Maske zu berühren.



So muss es aussehen, wenn die Schutzmaske korrekt angelegt ist.



Berühren Sie die Maske nicht während des Tragens, ohne vorher die Hände gewaschen zu haben.



Wechseln Sie die Maske, falls diese feucht geworden ist und benutzen Sie diese nicht erneut.